


Ficha Técnica

IDEXX BVDV Ag POC

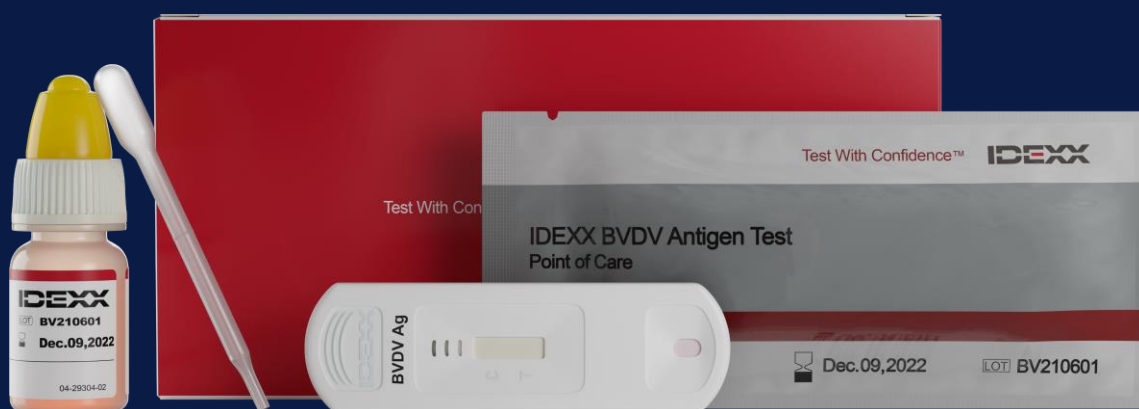

A evolução da saúde animal



Versão 01/25
Atualizado em 27/03/2025

IDEXX BVDV Ag POC



KIT DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA DIARREIA VIRAL BOVINA (BVDV)



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 10.367/2020 em 20/11/2020.

INDICAÇÕES

Teste rápido para a detecção do vírus da diarreia viral bovina (BVDV) em animais persistentemente infectados, usando amostras de entalhe de orelha (ou biópsias de amostras de tecido da orelha).

DESCRIÇÃO

Dispositivo plástico com sistema de fluxo lateral, com cavidade de recebimento das amostras e janela de resultado.


APRESENTAÇÃO

Caixa contém:

- 10 pacotes com um dispositivo de fluxo lateral e com uma pipeta, cada pacote.
- Dois frascos de 4,5 mL de tampão.

Os tubos para biópsia de amostra de tecido de orelha são fornecidos separadamente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

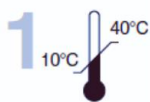

Coloque todas as amostras e componentes do teste em temperatura operacional.




Amostra de tecido da orelha

Coloque a amostra de tecido da orelha em um tubo de amostra e, em seguida:

- Para uma pequena amostra de tecido da orelha (≥ 2 a 3 mm): adicione 8 gotas de tampão.
- Para uma amostra grande de tecido da orelha (≥ 1 cm): adicione 16 gotas de tampão.
- Agite para misturar.
- Deixe em imersão por 5 minutos a 3 dias.



Coloque o teste em uma superfície plana, em seguida, use a pipeta fornecida para adicionar 1 gota da amostra ao poço de amostra no dispositivo de teste.

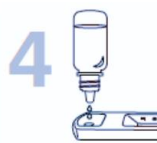

Dentro de 1 minuto após a etapa 3, adicione 2 gotas de tampão ao poço da amostra e ligue o cronômetro. **Nota:** Se o líquido não passar na janela de resultado dentro de 30 segundos após a adição do tampão, adicione novamente 1 gota do tampão no orifício da amostra.




Leia os resultados do teste após 15 a 30 minutos.

RESULTADO

Nota: A cor na linha de controle pode aparecer mais cedo, mas os resultados só estarão completos 15 minutos depois da adição do tampão ao poço da amostra.


Resultado positivo

A cor vermelha na linha de teste tem intensidade maior que a cor de fundo.

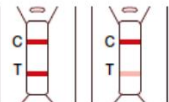


Resultado negativo

A cor vermelha na linha de teste tem intensidade igual ou menor que a cor de fundo.

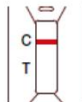

Resultado inválido

Se o fundo colorido obscurecer o resultado do teste ou a linha de controle não ficar colorida, repita o teste.

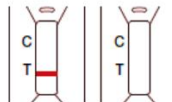

IDEXX



Biogénesis
Bagó

IDEXX BVDV Ag POC



KIT DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA DIARREIA VIRAL BOVINA (BVDV)



ADVERTÊNCIAS

Manipule todos os materiais biológicos como se pudessem transmitir o BVDV.

Não faça a contaminação cruzada do(s) dispositivo(s) de coleta da amostra.

Não pipete pela boca.

Não reutilize as pipetas que entraram em contato com uma amostra.

Não coma, beba ou fume no local em que as amostras ou os componentes do teste tenham sido manipulados.

Não misture os componentes dos testes com números de lote diferentes.

Descontamine corretamente todos os resíduos, antes do descarte.

CONSERVAÇÃO

Prazo de validade de 18 meses para armazenamento a 4°C.

Conservar e utilizar (entre 2°C e 30°C).

GTIN & NCM

GTIN

1000000016901

NCM

3822.19.90

IDEXX



Biogénesis
Bagó